

Hygiënische Keuken Reiniger by "Frosch"

Art.nr.: FRO-REIN



3,25EUR / Unit

incl. 21% BTW plus [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 1-3 dagen

Medicatiecup / vernevelaar: spuit 3 keer «Frosch Küchen Hygiene Cleaner» in de vernevelaar. Sluit de blauwe dop. Laat het weken, schud het en gooi vervolgens de inhoud weg. Voeg vervolgens gedistilleerd water toe, schud en gooi weg. Voeg vervolgens weer wat gedistilleerd water toe en laat ongeveer 10 seconden vernevelen. Deze procedure lost ook eventuele lichte olieresten op en reinigt de vernevelaar, als deze zelfs besmet is.

Masker en aerosolkamer: veeg masker en aerosolkamer af met een vochtige doek. Voor verdere vervuiling kunt u het masker en de aerosolkamer in de vaatwasser plaatsen (niet meer dan 35 graden - voorzichtig wassen). Bovendien kan het masker op elk moment worden gespoten en gereinigd met de «Frosch Küchen Hygiene Cleaner» (LET OP: geen desinfecterende werking, geen biocide.) Meer informatie op <http://www.frosch.de>