

Conditie




Gedestilleerd Water

Art.nr.: FL-RP-0020-1



4,07EUR / Unit

incl. 9% BTW plus [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 1-3 dagen

Schoonmaken van de medicatiecup met gedestilleerd water en Frosch:

Spuit 3 keer «Frosch Küchen Hygiene Cleaner» in de medicatiecup. Sluit de blauwe dop. Laat het weken, schud het en gooi vervolgens de inhoud weg. Voeg vervolgens gedestilleerd water toe, schud en gooi weg. Voeg vervolgens weer wat gedestilleerd water toe en laat ongeveer 10 seconden vernevelen. Deze procedure lost ook eventuele lichte olieresten op en reinigt de medicatiecup, als deze zelfs besmet is.