

## Conditie




### Flexineb® Inlaatklep

---

Art.nr.: RP-11

**29,99EUR** / Unit

incl. 21% BTW plus [Verzendkosten \(naarNL\)](#)

 Levertijd 3-5 dagen



De inlaatklep bevindt zich bovenop de aerosolkamer van uw maskersysteem.

Deze inlaatklep laat lucht in het masker stromen terwijl het paard inhaleert. Hierdoor kan uw paard zowel zijn medicatie inademen als de lucht die nodig is om volledig te ademen. Het blauwe rubber puilt uit en zorgt zo voor de benodigde luchttoevoer.

## Condities

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



## Conditie



### **INFO Houd rekening met het volgende als u de inlaatklep een keer moet vervangen of moet verwijderen voor reiniging:**

- Maak eerst de inlaatklep zacht door het kort in heet (niet kokend!) water te plaatsen. Hierdoor wordt het plastic zachter en kan de klep gemakkelijker over de opening van de aerosolkamer worden geplaatst
- Plaats de inlaatklep met de bovenkant op de palm van de hand (zie afbeelding 1)
- Duw de inlaatklep (met de rechte kant met de twee verhogingen) in een kantelende beweging van de pols op de bovenste opening van de aerosolkamer (zie afbeelding 2) en duw de ronde zijde dus iets naar beneden totdat de inlaatklep volledig op zijn plaats zit (zie afbeelding 3).

Let op en vermijdt de volgende fouten:

- Oefen geen stevige druk van bovenaf uit op de klep, anders kan het materiaal gemakkelijk breken
- Breng de klep niet van bovenaf op de aerosolkamer aan, maar zoals weergegeven in afbeelding 2 en 3